

Konfiguration Acuson Juniper / Acuson Maple mit DICOM

- Auf dem Touchscreen oben links das **Zahnradsymbol** antippen
- am Monitor **Netzwerk** (links weiter unten im Menü) anklicken. Hinweis: (Maustaste ist die Fadenkreuztaste neben dem Trackball)

- Karteireiter **Lokaler Host**
- **Neu** anklicken
- **Punkt setzen** bei Statische IP-Adresse
- Alias: **Juniper**
- AE-Title: **Juniper**
- Hostname: **Juniper**
- IP-Adresse: **IP des US-Gerätes**
- Subnetz-Maske: **Subnetzmaske des Servers**
- Standard-Gateway: **Gateway-IP**
- **Anwend.** anklicken

- Karteireiter **Speicherserver**
- **Neu** anklicken
- Alias: **sonoGDT**
- AE-Title: **sonoGDT**
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- Portnr.: **105**
- rechts **SR senden** markieren
- alle anderen Einstellungen belassen, **Anwend.** anklicken
- den Haken vor dem Eintrag **sonoGDT** setzen
- rechts **Auto-Speichern auf DICOM** markieren
- den Punkt setzen **Bei Untersuchung speichern**

- Karteireiter **Arbeitslistenserver**
- **Neu** anklicken
- Alias: **Worklist**
- AE-Title: **US01**
- IP-Adresse: **IP des Servers**
- Portnr.: **104**
- alle anderen Einstellungen belassen, **Anwend.** anklicken
- rechts **Einfache Suche** und **Strenge Überprüfung** markieren

- ganz rechts unten **Schließen** anklicken